

# TECSAFE GESICHTSVISIER BASIC




## MONTAGEANLEITUNG

- » Klappbares TECSAFE Gesichtsvisier aus schlagfestem 0,5 mm PET-G
- » Robuste Ausführung und hoher Tragekomfort
- » Alle Teile lassen sich aufgrund der Materialauswahl dem Recyclingkreislauf zuführen.
- » Alle Teile desinfizierbar
- » Latexfrei
- » Made in Germany
- » Premiummodell mit geringem Gewicht von nur 70 Gramm

## TECSAFE FACESCREEN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- » Adjustable Facescreen out of impact resistant 0,5 mm PET-G
- » Robust model with high wearing comfort
- » All pieces are recyclable due to the material choice
- » All parts are able to disinfect
- » Free from latex
- » Made in Germany
- » Premium model with a low weight of just 70 gram

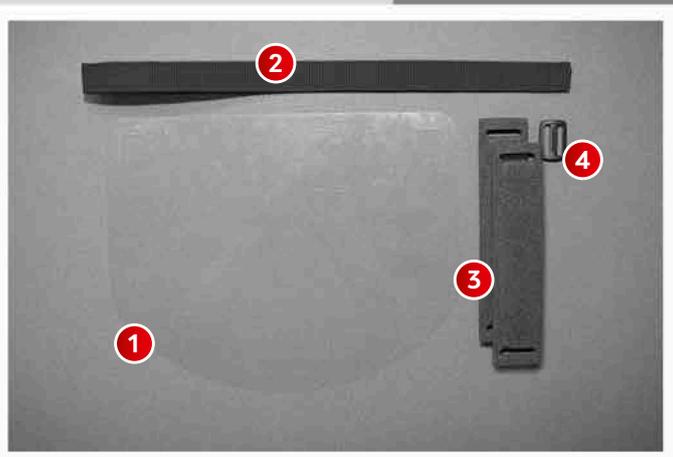

## INHALT

### Basicverschluss

- ① 1x Visier aus 0,5 mm PET-G
- ② 1x Haltegurt schwarz
- ③ 2x Stirnpolster
- ④ 1x Versteller

Visiere und Stirnpolster als Ersatzteile bestellbar

## CONTENT

### Basic fasten

- 1x Screen out of 0,5mm PET-G
- 1x strap black
- 2x forehead foam
- 1x adjuster Belt

Screens and forehead foam can be ordered as spare parts



- 1** Haltegurt durch die Langlöcher im Stirnpolster ziehen. Stirnpolster sollte in der Mitte des Haltegurtes liegen.  
*Pull the strap through the long slots from the forehead foam. Forehead foam should be in the middle of the strap.*



- 2** Die Enden des Haltegurtes links und rechts durch die Öffnungen im Visier ziehen.  
*Pass both ends of the strap through the cutouts in the screen.*



- 3** Linkes Gurtende durch den Versteller ziehen (A) und zurückführen (B).  
*Pass the left end of the strap through the adjuster (A) and back (B).*



- 4** Rechtes Gurtende durch die noch freie Öse des Steckverschlusses ziehen (C) und durch die Sicherungsschnalle zurückführen (D).  
*Pass the right end of the strap through the free eyelet of the press lock (C) and return through the adjuster (D).*



- 5** Beide fest ziehen und auf den gewünschten Kopfumfang anpassen (E).  
*Tightening both ends and adjust to the individual head circumference (E).*

- !** Zur besseren Anschauung wurde für die Montageanleitung ein rotes Band verwendet!  
*For better clarity, a red band was used for the assembly instructions!*