

TECSAFE GESICHTSVISIER PREMIUM



MONTAGEANLEITUNG

- » Klappbares TECSAFE Gesichtsvisier aus schlagfestem 0,5 mm PET-G
- » Robuste Ausführung und hoher Tragekomfort
- » Alle Teile lassen sich aufgrund der Materialauswahl dem Recyclingkreislauf zuführen.
- » Alle Teile desinfizierbar
- » Latexfrei
- » Made in Germany
- » Premiummodell mit geringem Gewicht von nur 70 Gramm

TECSAFE FACESCREEN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- » Adjustable Facescreen out of impact resistant 0,5 mm PET-G
- » Robust model with high wearing comfort
- » All pieces are recyclable due to the material choice
- » All parts are able to disinfect
- » Free from latex
- » Made in Germany
- » Premium model with a low weight of just 70 gram

INHALT

Premiumverschluss mit Clip

- ① 1x Visier aus 0,5 mm PET-G
- ② 1x Haltegurt schwarz
- ③ 2x Stirnpolster
- ④ 1x Steckverschluss (2-teilig)
- ⑤ 1x Versteller


Visiere und Stirnpolster als Ersatzteile bestellbar

CONTENT

Premium fasten with press lock

- 1x Screen out of 0,5mm PET-G
- 1x strap black
- 2x forehead foam
- 1x press lock
- 1x adjuster Belt

Screens and forehead foam can be ordered as spare parts

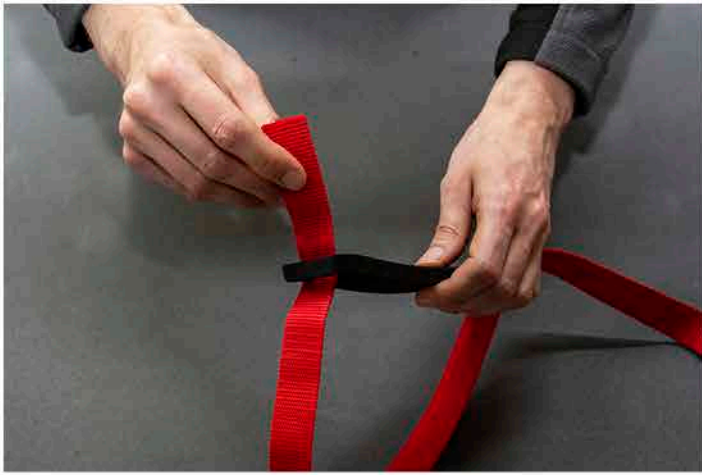



- 1** Haltegurt durch die Langlöcher im Stirnpolster ziehen. Stirnpolster sollte in der Mitte des Haltegurtes liegen.

Pull the strap through the long slots from the forehead foam. Forehead foam should be in the middle of the strap.





- 2** Die Enden des Haltegurtes links und rechts durch die Öffnungen im Visier ziehen.

Pass both ends of the strap through the cutouts in the screen.

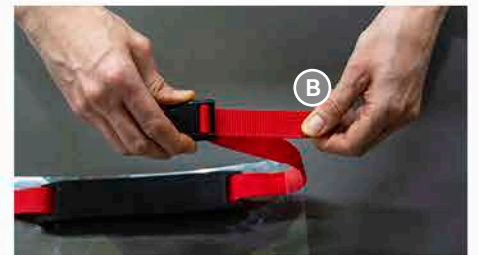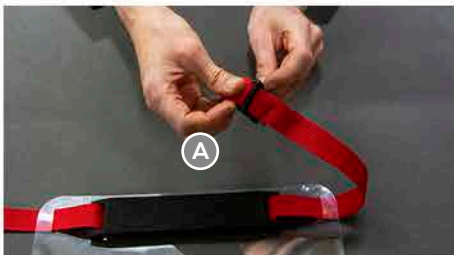




- 3** Rechtes Gurtende durch den Steckverschluss ziehen (A) und zurückführen (B). **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Gurtende von unten durch den Steckverschluss gezogen wird. Dieser liegt so, dass die rechte Strebe nach unten geneigt ist.

*Pass the right end of the strap through the press lock (A) and return (B): **Attention:** Please make sure that the end of the strap will pass the press lock from the bottom. The right strut must be down for mounting.*

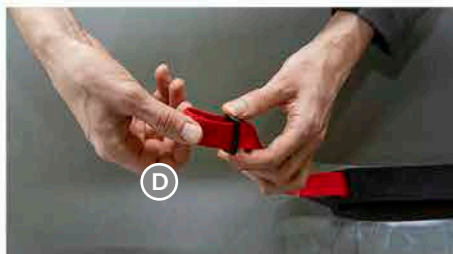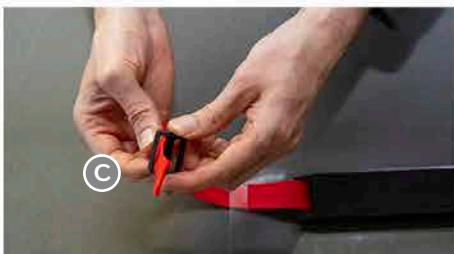

- 4** Linkes Gurtende durch den Versteller ziehen (C) und zurück führen (D).

Pass the left end of the strap through the adjuster (C) and back.

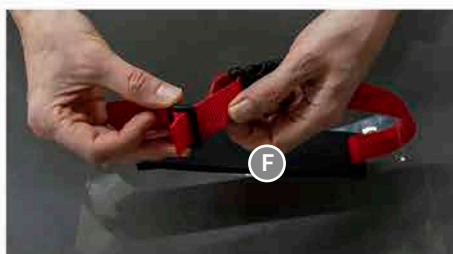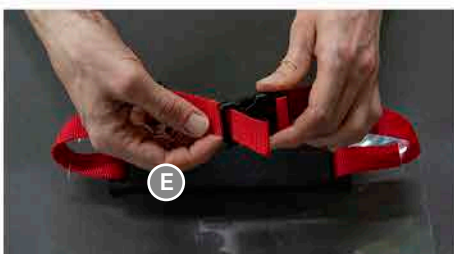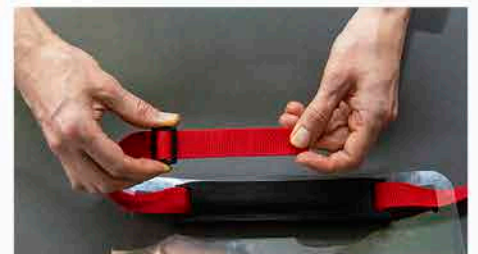

- 5** Linkes Gurtende durch die noch freie Öse des Steckverschlusses ziehen (E) und durch die Sicherungsschnalle zurückführen (F). Fest ziehen und auf den gewünschten Kopfumfang anpassen.

Pass the left end of the strap through the free eyelet of the press lock (E) and return through the adjuster (F). Tightening the end and adjust to the individual head circumference.

- !** Zur besseren Anschauung wurde für die Montageanleitung ein rotes Band verwendet!

For better clarity, a red band was used for the assembly instructions!

TESAFE
Schaum
nach Maß